

SOCLE MOBILE POUR GARROT PNEUMATIQUE

FICHE TECHNIQUE

Un socle mobile pour garrots pneumatiques DDM
fabriqué en France !



Le socle mobile est destiné à être utilisé avec les garrots pneumatiques DDM.
Il comprend :

- un plateau de fixation, avec une poignée afin de faciliter le déplacement,
- un pied muni de 5 roulettes dont 2 avec frein,
- un panier de rangement destiné aux brassards et rallonges pneumatiques.

RÉFÉRENCES


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EN CM		POIDS EN KG
		HAUTEUR	EMPRISE AU SOL	
A10701	Socle mobile pour garrot pneumatique	98	Ø 65	+/- 15kg

MODE D'EMPLOI

- Le socle mobile est utilisé avec les garrots pneumatiques DDM.
- Le garrot pneumatique est maintenu sur le plateau du socle mobile à l'aide de molettes de fixation à visser.
- Au risque de le faire chuter, ne pas propulser l'appareil monté sur socle mobile, une poignée est prévue pour effectuer toute manoeuvre sécurisée en tirant ou en poussant le dispositif pour franchir de face tout obstacle sur le sol.
- Le déplacement du pied mobile se fait en poussant vers l'avant. Conserver une main sur la poignée pour franchir tout dénivelé.
- Pour éviter tout déplacement accidentel, il est fortement recommandé de verrouiller les freins de roulettes.
- Déplacer le garrot pneumatique uniquement lorsque l'alimentation réseau de l'appareil est débranchée.
- Eloigner le cordon d'alimentation des roulettes du dispositif.

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS SOUS ENSEMBLES

IDENTIFIANT	DÉNOMINATION	CARACTÉRISTIQUES
A	Plateau de fixation	Aluminium + peinture epoxy
B	Potence avec platines	Aluminium + peinture epoxy
C	Panier	Acier thermolaqué
D	Socle 5 branches	Acier thermolaqué
E	Roulettes	2 roulettes pivotantes à blocage de roue + 3 roulettes pivotantes simples. Chape en polyamide. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision.

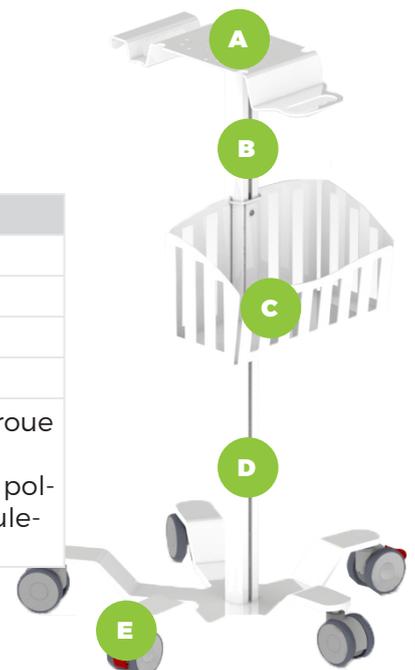

NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Pulvérisation de solutions décontaminantes.

MAINTENANCE

Nettoyage des roulettes afin d'éliminer tout résidu de poussière ou de matière qui pourrait gêner le déplacement de l'appareil.

CONDITIONNEMENT

REFERENCE	NOMBRE D'UNITÉS PAR CDT
A10701	1

STOCKAGE

TYPE D'EMBALLAGE	LOCAL	TEMPÉRATURE	HYGROMÉTRIE	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
Origine	Ventilé	-10° à 40° C	30 à 40 %	500 à 1060 hPa

GARANTIE

La durée de la garantie est de 24 mois dans les conditions normales d'utilisation. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

Le produit doit être utilisé conformément à son usage prévu. Il ne doit pas avoir été modifié, ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation abusive ou inappropriée.

LA QUALITÉ DDM**Service après-vente**

GSH assure la maintenance et la réparation des socles mobile pour garrot.
Contactez notre centre de support technique au :
+33 4 42 90 31 31.

Garantie

La durée de la garantie est de 24 mois dans les conditions normales d'utilisation. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.