



Il est impératif de lire ces instructions avant toute utilisation des câbles et capteurs BIOGENESIS.



Biogenesis[®]
we care about **life**

SPO2

La série de capteurs d'oxymétrie BLOOX est conseillée pour l'utilisation d'une large gamme d'équipements hospitaliers, sa construction assure une totale isolation électrique des composants face aux surfaces externes.

Nettoyage

Nettoyez les capteurs à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution d'eau et détergent neutre
Ne pas immerger la sonde

Décontamination

Utilisez uniquement de l'alcool isopropylique


Garantie

Tous les capteurs BLOOX sont couverts par une garantie d'un an pour tout défaut de fabrication
Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou manipulation ne sont pas couverts
La durée de vie des capteurs dépend de son usage dans des conditions d'entretien et d'utilisation normales

Avertissement

Facteurs pouvant réduire le rendement du capteur :

- Lumière excessive,
- Mouvement excessif,
- Interférence électro chirurgicale,
- Cathéters artériels, manchettes de pression artérielle, ligne de perfusion, etc,
- Humidité dans le capteur,
- Capteur mal connecté,
- Type de capteur incorrect,
- Perfusion limitée,
- Pulsations veineuses,
- Anémie ou faibles concentrations d'hémoglobine,
- Colorants cardiovasculaires,
- Capteur n'étant pas placé au niveau du cœur

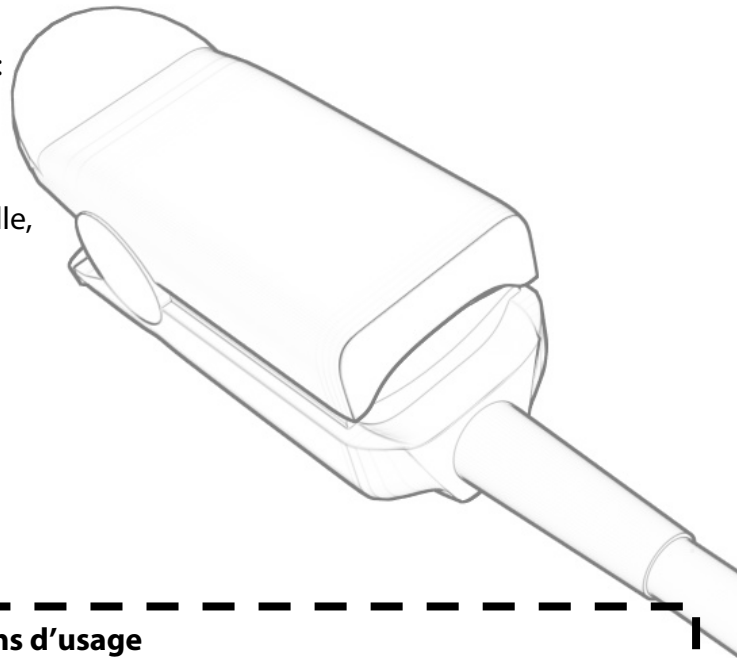


Précautions d'usage

Ne pas utiliser en autoclave
Utiliser le capteur avec douceur

Ne pas tirer sur le câble pour déconnecter ; Tirez toujours depuis le connecteur
Evitez de mouiller les câbles avec de l'alcool, détergents forts ou substances alcalines
L'application d'éther ou d'acétone cause une perte de flexibilité du câble
En cas de non utilisation, emmagasiner dans un endroit à températures inférieures à 50°C



BIOGENESIS S.R.L. | Plaza Independencia 831 Of. 607 | ZIP 11100
Montevideo, Uruguay | Tel.: +598 26047077 | eMail: info@biogenesis.com.uy

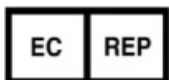

CMC Medical Devices & Drugs S.L. | C/ Horacio Lengo Nº18 | ZIP 29006
Málaga, Spain | Tel.: +34 951214054 | eMail: info@cmcmmedicaldevices.com

**CE DISPOSITIF DOIT ETRE UTILISE PAR
DES PROFESIONNELS QUALIFIES**



E CL 98 v005

Ref.:NU_CAPTEURS_1VA_070319