
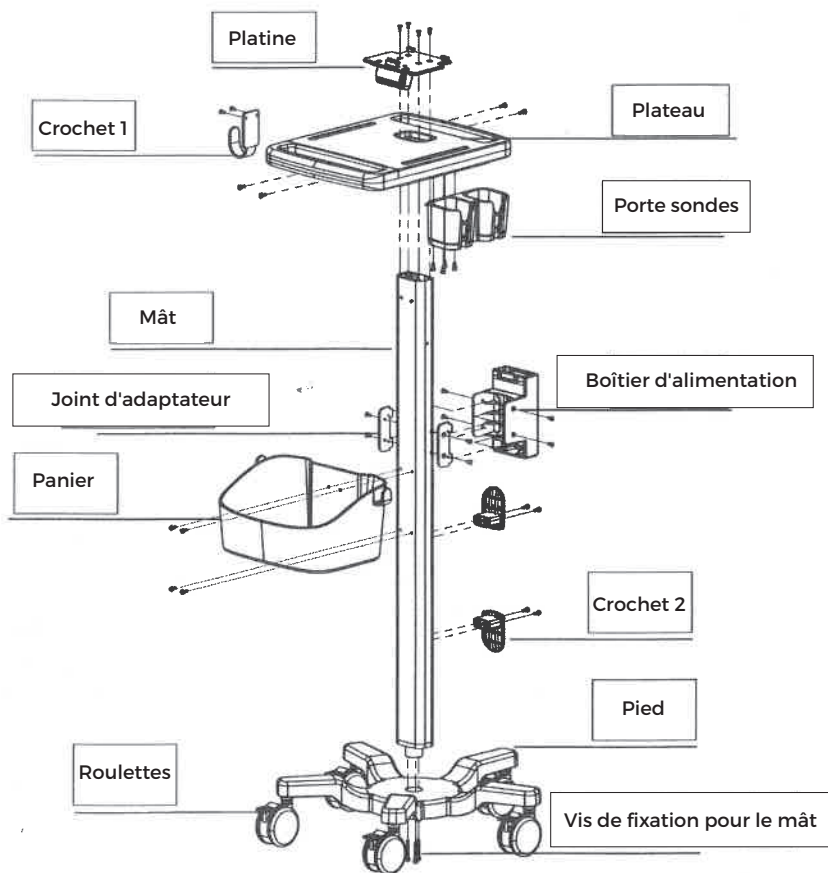
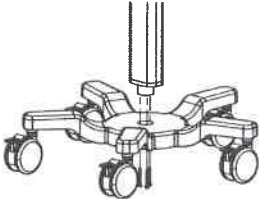


1. Schéma des pièces du support du socle

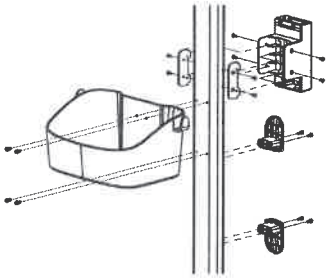

2. Assemblage du socle

1	Installez le mât - Insérez le mât du socle à la base - Utilisez 4 vis hexagonales et une entretoise pour verrouiller le mât. (M5*30mm)	
2	Installez le panier - Fixez le panier au trou de montage du mât avec 8 vis à six pans creux. Couvrez les trous de vis avec des bouchons en caoutchouc. (M4*10mm) Installez le crochet - Fixez le crochet au trou de mise en place du mât avec 4 vis à douille hexagonale. Couvrez les trous de vis avec des bouchons en caoutchouc. (M4*14mm) Installez le boîtier d'alimentation - Utilisez 4 vis à douille Allen pour fixer les 2X de joint d'adaptateur sur les trous de montage des deux côtés de la colonne. (M4*10mm) - Utilisez 4 vis à douille Allen pour fixer le boîtier d'alimentation sur l'entretoise de l'adaptateur. (M4*10mm)	
3	Installez le plateau - Fixez le plateau au trou de montage avec 3 vis à tête fraisée. (M4*10mm) Installez le porte sondes - Utilisez 4 vis à clé Allen pour monter le porte sondes sur le côté droit de la table. (M4*8mm) Installez le crochet - Utilisez 2 vis à clé Allen pour monter le crochet sur le côté gauche de la table. (M4*8mm) Installez la Platine - Utilisez 4 vis à douille hexagonales pour monter la plaque de fente sur le dessus du mât. (M4*20mm)	